

---

DOCTOR *Pen*

**MANUAL DO USUÁRIO**

Por favor, leia o manual antes do uso.

# Conheça seu Doctor Pen



## Como operar

Para carregar a bateria conecte o adaptador a uma tomada e conecte-o à interface de energia.



O indicador de energia fica verde quando a carga está completa.

O indicador de energia permanece vermelho ao carregar.

## Preparação

1. Retire o cartucho da agulha da embalagem esterilizada;
2. Encaixando a ranhura redonda 1 em 2 da máquina, empurre a agulha cartucho horizontalmente até o fim;
3. Trave o cartucho da agulha girando-o para o sentido anti-horário;
4. Vire o cartucho da agulha no sentido horário e empurre para fora horizontalmente, caso queira removê-lo.



5. Inicie a Doctor Pen;  
Pressione o botão liga/desliga por 2-3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

### Atenção

Para não danificar o dispositivo, não inverta a posição de aplicação, evitando o refluxo de fluido para dentro da máquina.

---

## Ajuste do comprimento da agulha

Ajuste a profundidade da agulha girando a escala.

Gire no sentido horário, para diminuir a profundidade da agulha;

Gire no sentido anti-horário, para aumentar a profundidade da agulha.



Ajuste de 5 velocidades;

A caneta começa de baixa velocidade para alta velocidade;

A velocidade muda uma vez a cada clique no botão liga e desliga.

---

## Advertências e precauções:

Não utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- Não utilize com energia além de AC 220V;
- Não utilize próximo a locais com alta temperatura, poeira ou umidade (ex: perto de umidificador);
- Não desmonte ou altere o controlador e o corpo;
- Não toque no dispositivo ou desconecte os cabos de alimentação com as mãos molhadas, isso pode causar choque elétrico;
- Não use o cabo descascado ou o cabo apoiado;
- Quando você não estiver utilizando por um longo tempo, desligue-o da tomada;
- Certifique-se de fazer uma inspeção para teste. Caso encontre algum problema, procure assistência autorizada;
- Ninguém, além do operador, pode tocá-lo. Isso pode causar acidentes.

---

## Manutenção Geral

**Certifique-se de inspecionar o dispositivo e o adaptador antes usar:**

1. Mantenha-o desligado;
2. Limpe sua superfície com um pano seco;
3. Mantenha-o longe da luz solar direta ou alta temperatura e umidade;
4. Não faça reparos ou alterações no dispositivo. Caso tenha algum problema, envie para a assistência técnica autorizada;
5. Antes de usar o dispositivo (que não tenha sido utilizado por um longo período de tempo), certifique-se que ele está funcionando corretamente.

### Observação


A bateria totalmente carregada tem duração de 1 hora e 30 minutos, após esse período, é necessário recarregar ou usar seu dispositivo conectado ao cabo de energia.




# Modelos de cartuchos



DPS 01

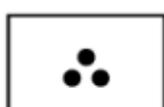


DPS 03

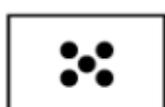


DPS 05



DDP 03

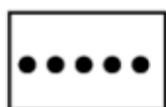


DDP 05

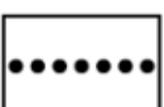

DDP 07




DPS 12

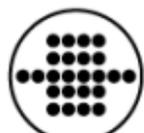

DDP 24



DPS 36

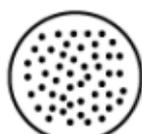

DPS Nano

## Especificações

### Contém na embalagem

Nome do Produto: Doctor Pen

Modelo: DP-8S

Peso do pacote: 318g

Anvisa: 81569120020



Doutor da Estética

---

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>
Manual	01 peça
Adaptador	01 peça
Peça de mão	01 peça
Cabo de energia	01 peça
Cartucho de agulhas	02 peças

## **Garantia**

O período de garantia da Doctor Pen é de doze meses após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal.

A garantia ficará automaticamente inválida caso:

- Não seja apresentada a nota fiscal de compra;
- Equipamento seja reparado por pessoas não autorizadas, sofra quedas bruscas, hajam danos decorrentes de acidentes, ou seja, identificado o mal uso do dispositivo.

O período de garantia do carregador é de seis meses após a data da compra, mediante nota fiscal.



Atendimento ao consumidor  
**sac@doutordaestetica.com.br**  
[www.doutordaestetica.com](http://www.doutordaestetica.com)



**Doutor da Estética**